

Guía rápida Kardiamobile 6L

ECG de 6 derivaciones

Configure su teléfono o tablet

1

Descargue la aplicación Avis.Care desde la App Store o Google Play.



2

Asegúrese que Bluetooth esté activado en su teléfono o tablet.

3

Abra la aplicación Avis.Care e inicie sesión o registre una nueva cuenta gratuita.

4


Siga las instrucciones en pantalla y complete la configuración de su cuenta.

Para información adicional, visita nuestro sitio avis.care/pages/instrucciones o escribe a info@avis.care o llama al +562 2994 2040

Configure su teléfono o tablet

KardiaMobile 6L tiene 2 electrodos en la parte superior del dispositivo y uno en la parte inferior.

Electrodos superiores (manos izquierda y derecha)

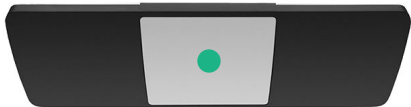

Electrodo inferior (pierna izquierda)

Dos tipos de ECG

KardiaMobile 6L es capaz de realizar dos tipos de ECG: de derivación única, la más comúnmente utilizada; y de 6 derivaciones, que entrega más información para su médico. Ambos tipos de ECG detectan ritmo sinusal normal, fibrilación auricular, bradicardia y taquicardia.

ECG de derivación única

Un ECG de derivación única es el método más simple. Es medido depositando el dispositivo ECG sobre una superficie plana, cercana a su teléfono y posando dos dedos de la mano izquierda y derecha sobre los electrodos del dispositivo.

ECG de 6 derivaciones

Un ECG de 6 derivaciones es realizado para entregar información más detallada a su médico. Se realiza apoyando el dispositivo, con su electrodo inferior, sobre la piel descubierta de su pierna izquierda (rodilla o parte interior del tobillo) y posando los dedos de su mano izquierda y derecha sobre los electrodos superiores.

Registro de ECG de derivación única

1

Abra la aplicación y presione “Controlarme” y luego en “Cardio”.

2

Asegúrese que la opción de “ECG de una derivación” se encuentra seleccionada.


3

Ubique el dispositivo sobre una superficie plana cerca de su teléfono inteligente. Asegúrese que el dispositivo se encuentre en la orientación correcta, con la “A” de AliveCor mirando hacia arriba, tal como se aprecia en la imagen.



4

Cuando esté listo, posicione dos dedos de cada mano en los electrodos superiores. No es necesario ejercer presión o presionar fuertemente.

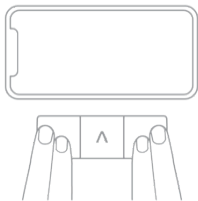

5

La medición comenzará automáticamente. Manténgase quieto durante la cuenta regresiva de 30 segundos hasta que la medición se complete.

Registro de ECG de 6 derivaciones

1

Abra la aplicación y presione “Controlarme”.

2

Seleccione “Cardio” y siga las instrucciones en pantalla para realizar la toma de ECG.

3

Seleccione la opción “ECG de 6 derivaciones”.

4

Cuando esté listo, sostenga su dispositivo ECG con sus pulgares tocando los electrodos superiores. No hay necesidad de presionar con fuerza. Asegúrese que el dispositivo se encuentre en la orientación correcta, con la “A” de AliveCor mirando hacia arriba, tal como se aprecia en la imagen.





5

Con sus pulgares posados en la dos electrodos superiores, ponga el dispositivo ECG sobre la piel descubierta de su pierna izquierda (rodilla o parte interior del tobillo). El electrodo inferior debe hacer contacto directo con la piel.

6

La medición comenzará automáticamente. Manténgase quieto durante la cuenta regresiva de 30 segundos hasta que la medición se complete.

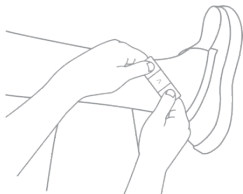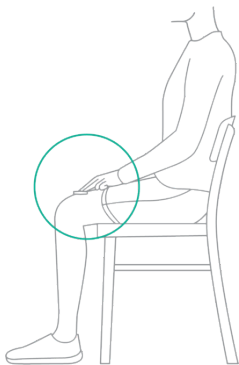

Consejos útiles

Estoy teniendo problemas obteniendo una lectura limpia.

Si tiene la piel seca, humecte con agua o loción.

Al medir un ECG de 6 derivaciones, es importante posicionar el dispositivo en su pierna izquierda (rodilla o parte interior del tobillo). El dispositivo debe usarse en contacto directo con la piel.

Si la medición no se estabiliza, ajuste la posición y siéntese cómodamente. Asegúrese que sus brazos, manos y pierna izquierda permanezcan inmóviles para reducir ruido muscular. No ejerza demasiada presión en los electrodos.

No veo una lectura ECG

Asegúrate que Bluetooth esté activado en el teléfono inteligente o tablet y siga las instrucciones en “Registro de ECG de derivación única” o “Registro de ECG de 6 derivaciones”.

Ver resultados

En la sección “Controlarme” presione los 3 puntos en “Cardio” y luego “Historial”. Presionando el resultado deseado, puede descargar el informe en PDF o compartirlo por medio de correo electrónico.

Para información adicional, visita nuestro sitio avis.care/pages/instrucciones o escribe a info@avis.care o llama al +562 2994 2040