


A&D

A&D Medical

UC-352BLE

**BASCULA DE PESO
CONECTADO DELUXE**

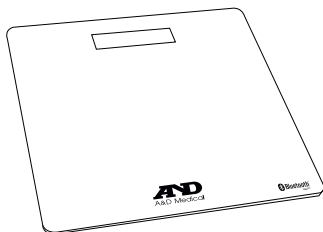


Instructivo

Guía de inicio.....	S-2
Precauciones de seguridad.....	S-3
Función de comunicación inalámbrica	S-4
Accesorios.....	S-4
Nombres de las piezas.....	S-5
Instalación (o sustitución de las baterías)	S-6
Registro con un receptor (enlace)	S-7
Ajustes de la unidad	S-8
Medición de su peso.....	S-9
Otras funciones	S-10
Especificaciones.....	S-12
Antes de solicitar servicio.....	S-13
Mantenimiento de la báscula.....	S-13


Felicidades por la adquisición de una moderna báscula A&D para la salud: una de las básculas para la salud más avanzadas de las que se dispone en la actualidad. Este dispositivo, de gran precisión y facilidad de uso por su diseño, facilitará su régimen de control cotidiano del peso. Se recomienda que lea la totalidad del presente manual cuidadosamente antes de usar el dispositivo por primera vez.

Guía de inicio


Comience Get Started

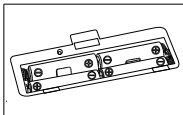

Instale las baterías

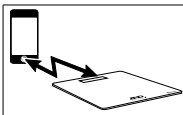

Enlace con un receptor

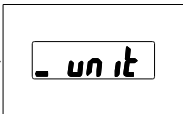


Ajuste la unidad


Medición



Súbase a la báscula

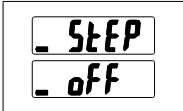

Confirme que “StEP” y “oFF” se muestren de forma alterna

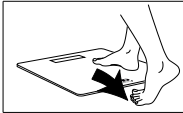

Bájese de la báscula






Confirme su peso


Los datos se transmiten a su dispositivo móvil
Los datos se almacenan en la báscula si no hay ningún receptor


Precauciones de seguridad

Los elementos siguientes contienen información para evitar el riesgo de daños o lesiones en el caso de usted u otras personas. Léalos cuidadosamente y asegúrese de utilizar este producto de forma correcta.

 Peligro:	Este símbolo señala "un peligro inmediato que podría provocar la muerte o lesiones graves".
 Advertencia	Este símbolo señala "la posibilidad de muerte o lesiones graves".
 Precaución	Este símbolo señala "la posibilidad de lesiones físicas o daños a los bienes".

Precauciones de uso

 Advertencia
<ul style="list-style-type: none">• No se fie del autodiagnóstico al intentar bajar de peso o realizar ejercicios terapéuticos; siga las instrucciones de un médico o especialista.• No se pare sobre los bordes de la báscula ni brinque sobre esta; la consecuencia podría ser una caída que produzca lesiones. Además, el impacto podría dañar la báscula.• No use la báscula sobre una superficie irregular, ya que la báscula podría dañarse. Además, la báscula no podrá realizar mediciones precisas.• No use la báscula sobre una superficie resbalosa ni se pare sobre la báscula con los pies húmedos, ya que podría resbalarse y lesionarse. Además, la báscula no podrá realizar mediciones precisas.

 Precaución
<ul style="list-style-type: none">• No coloque la báscula donde esté expuesta a agua o humedad excesivas, como en el baño, donde esté expuesta a la luz solar directa, donde esté expuesta directamente a la salida de aire de una unidad de aire acondicionado, ni cerca del fuego. Lo anterior podría provocar una descompostura de la báscula.• Esta báscula solo debe usarse para medir el peso corporal.• Esta báscula es un dispositivo preciso de medición. No deje caer la báscula ni la esponja a vibraciones ni a descargas muy fuertes.• No desarme, repare ni modifique la báscula, ya que pueden producirse una descompostura o lesiones.• Al usar esta báscula, las personas con discapacidad deben recibir el apoyo de quien se encargue de sus cuidados; de lo contrario, la consecuencia podría ser una caída que produzca lesiones.• Al instalar las baterías, asegúrese de que los polos + (positivo) y el - (negativo) estén colocados de forma correcta. La colocación incorrecta puede provocar un sobrecalentamiento, la filtración de fluidos de las baterías o la ruptura de estas, con la consecuencia de daños a la báscula o lesiones.• Esta báscula está diseñada para el uso personal.• Guarde la báscula en un lugar alejado de los niños pequeños.• No guarde esta báscula en posición vertical. Si por alguna razón esta báscula se guarda en posición vertical, asegúrese de no permitir la caída de la báscula.• No coloque ningún artículo sobre esta báscula mientras esté guardada.• Si el uso de esta báscula se comparte con una persona que tenga una enfermedad infecciosa, como una enfermedad cutánea en los pies, entre otras, limpie la báscula antes de usarla. (Consulte la sección "Mantenimiento de la báscula (pág.13)" que contiene información detallada sobre cómo limpiar la báscula.• Para medir su peso de forma precisa, utilice la báscula sobre un piso plano y duro. No use una alfombra ni otra superficie suave

Función de comunicación inalámbrica

Esta báscula utiliza la tecnología inalámbrica *Bluetooth*[®] para comunicarse con un dispositivo receptor. Al final de la medición, los datos correspondientes se envían desde esta báscula al dispositivo receptor.

Bluetooth[®] es una tecnología de comunicación que permite a los dispositivos comunicarse de forma inalámbrica. El *Bluetooth*[®] marca y logos son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc y cualquier uso de estas marcas por A&D está bajo licencia. Otras marcas registradas y uso de nombres registrados pertenecen a sus dueños respectivos.

Dispositivo receptor

Este es un dispositivo, como una computadora personal o un teléfono inteligente, en el que se ha descargado e instalado una aplicación que permite la comunicación por *Bluetooth*[®] con esta

Precauciones para las funciones inalámbricas



Advertencia

- No debe usarse en lugares donde la comunicación inalámbrica esté prohibida, como en aviones o en hospitales. Esta báscula podría generar un efecto adverso en dispositivos electrónicos o equipo eléctrico médico.



Precaución

- Si la función de comunicación de esta báscula se utiliza cerca de un dispositivo inalámbrico que se comunique en la frecuencia de 2.4 GHz, podría disminuir la velocidad de procesamiento de ambos dispositivos. No debe utilizarse cerca de un horno de microondas donde podría presentarse una interferencia de campo magnético, electricidad estática u ondas de radio. (Es posible que la señal no llegue debido a razones medioambientales.)

* A&D Medical no se hace responsable de ninguna pérdida generada, como descomposturas o pérdida de datos que pudieran producirse a raíz del uso de esta báscula.

* No se garantiza que esta báscula pueda conectarse a todos los dispositivos compatibles con *Bluetooth*[®].


Accesorios

En caso de que alguno de los accesorios siguientes falte o esté dañado, comuníquese con el proveedor del producto o una sucursal de ventas de A&D.

- 1 x Manual de instrucciones
- 4 x pilas

Nombres de las piezas

Báscula

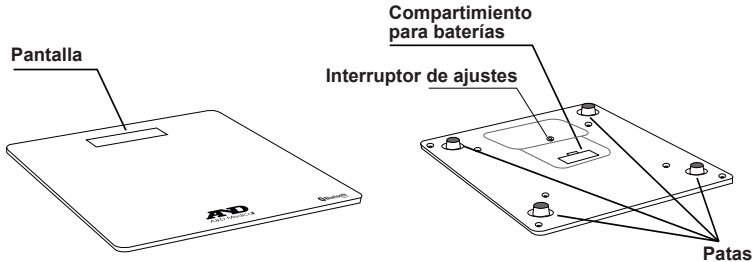

Sección de la pantalla




Símbolos de la pantalla

Sección de la pantalla


Símbolo	Nombre	Descripción
	Símbolo de "Lista/Estable"	Este símbolo se muestra cuando la pantalla de medición está estable.
	Indicador de baterías	El indicador de potencia normal de las baterías con la carga restante.
	Indicador de nivel bajo de las baterías	
	Símbolo de la comunicación por Bluetooth®	Si se muestra este símbolo, sustituya las cuatro baterías por unas nuevas.

Instalación (o sustitución) de las baterías


1. Abra la cubierta del compartimiento de las baterías en la parte inferior de la báscula.

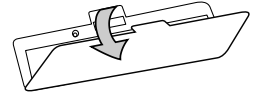


2. Instale cuatro baterías alcalinas tamaño AAA con los polos positivo (+) y negativo (-) alineadas correctamente con los símbolos correspondientes en el compartimiento para baterías.

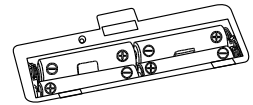

3. Cierre la cubierta del compartimiento para baterías.

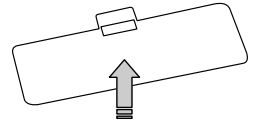

Precaución

- Instale cada batería con los polos positivo (+) y negativo (-) alineados adecuadamente con los símbolos correspondientes del compartimiento para baterías.
- La instalación inadecuada de las baterías puede provocar filtración en estas.
- Cuando se muestre el símbolo , sustituya las cuatro baterías por unas nuevas.
- No mezcle baterías nuevas con usadas, ya que la báscula podría dañarse o la vida útil de las baterías podría reducirse.
- Asegúrese de utilizar baterías alcalinas tamaño AAA. No utilice ningún otro tipo de batería.
- Nunca utilice baterías recargables con esta báscula.
- La vida útil de las baterías depende de la temperatura medioambiental, el tipo de las baterías y el uso.
- Las baterías provistas con el dispositivo son para comprobar el desempeño de la báscula y quizá tengan una vida útil limitada.
- Retire las baterías de su compartimiento cuando la báscula no se vaya a utilizar durante un período prolongado de tiempo. Si la báscula se guarda con las baterías instaladas, podrían producirse filtraciones de fluidos de las baterías y daños en la báscula. Las baterías suministradas son para verificar el funcionamiento de la báscula y quizá tengan un tiempo de vida corto.

Función de apagado automático

La báscula tiene una función de "apagado automático". Después de que los resultados de la medición se muestren durante 60 segundos, la báscula se apagará automáticamente.

Registro con un receptor (enlace)

Esta báscula debe registrarse con un receptor para utilizar la comunicación por *Bluetooth*® con el receptor. El proceso de registro de esta báscula con un receptor se conoce como "enlace". Cuando el enlace concluye, los datos de medición de esta báscula se envían de forma automática al dispositivo enlazado cada vez que se lleva a cabo una medición cuando el receptor está en el estado en que puede recibir transmisiones.

Consulte el instructivo del receptor y ajústelo para permitir el enlace. Si el receptor tiene un "asistente de enlace", utilícelo para llevar a cabo este procedimiento. Coloque el receptor y esta báscula lo más cerca posible para realizar el enlace.

1. Instale en esta báscula cuatro baterías alcalinas tamaño AAA.
 - Consulte información detallada en la sección "Instalación o (sustitución de las baterías)".
2. Confirme que la báscula esté apagada y mantenga presionado el interruptor de ajustes.
 - Cuando el interruptor de ajustes se presiona continuamente, "Pr" se muestra.
3. Suelte el interruptor de ajustes cuando se muestre "Pr".
 - "🔊" parpadea.
 - El receptor puede descubrir la báscula.
 - Para omitir el enlace, solo presione el interruptor de ajustes cuando se muestre "Pr".
4. Comience el enlace con el receptor.
 - Siga las instrucciones de enlace del receptor para buscar esta báscula, elegirla y enlazarse con ella.
5. Confirme que se muestre "End".



«🔊 Pitido»



🔊 Pitido 🔊 Pitido

Una vez que se haya hecho el enlace, no será necesario repetirlo al momento de cambiar las baterías.



Fabricada por:

A&D Company, Limited

1-243 Asahi, Kitamoto-shi,

Saitama, 364-8585 Japón

www.aandd.jp

[81] (48) 593-1119

Fabricada para:

A&D Engineering, Inc.

1756 Automation Parkway

San José, California 9531 EE. UU.

www.andmedical.com

1-888-726-9966